

RADIFOCUS INTRODUCER II M Coat

작성연월: 2023.03.14

품목명: 경피카테터

품목허가번호: 수인 04-998 호

**** 본 제품은 일회용 멸균 의료기기입니다. 재사용을 금지합니다. ****

**** 사용 전 본 사용설명서를 읽어 주시기 바랍니다. ****

사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 사용 전에 본 제품의 멸균포장에 이상이 없는지 확인하고, 손상이 없는 제품만을 사용하도록 한다.
- 2) 제품의 유효기간을 확인한다.

나. 사용방법

- 1) 바늘(Angio Needle)로 대퇴부 동맥을 찌른다.
- 2) 바늘 안으로 가이드와이어를 삽입하여 혈류의 역류를 방지한다.
- 3) 바늘을 혈관으로부터 빼낸다.
- 4) 혈관안에 삽입되어 있는 가이드와이어를 따라 혈관확장기(Dilator)와 혈관삽입보조관(Sheath)을 결합하여 혈관 안에 삽입한다.
- 5) 혈관삽입보조관(Sheath)을 남겨두고 혈관확장기(Dilator)와 가이드와이어를 혈관에서 빼낸다.
- 6) 카테터를 혈관 삽입 보조관으로부터 혈관안으로 삽입해, 진단 및 치료를 한다.

사용 시 주의사항

- 1) 포장을 뜯은 후 바로 사용하며 1회 사용하고 버린다.
- 2) 코팅제가 젖은 상태로 사용한다. 만약 표면이 건조할 시에는 사용 전 생리식염수로 표면을 적셔 사용한다.

기타사항

허가번호: 수인 04-998 호

품 목 명: 경피카테터 (A57260.01)

모 델 명: 제조원의 표시사항 참조(REF 참조)

수 입 원: 한국테루모(주)/서울특별시 서초구 서초대로 411, 23층 1호(서초동)/(02) 565-9225

제 조 원: 제조의뢰자: Terumo Corporation (일본)/44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

제조자: Terumo Corporation-Ashitaka factory(일본)/

150 Maimaigi-cho, Fujinomiya city, Shizuoka Prefecture, Japan

포장단위: 제조원 포장단위 (1ea)

저장방법: 직사광선을 피해 습기가 없는 건조한 실온에서 보관할 것.

사용목적: 본 품은 카테터 등을 경피적으로 맥관에 삽입하기 위해 사용하는 기구이다.