

TERUMO DENTAL NEEDLE

작성연월: 2023.03.14

품목명: 치과용주사침

품목허가번호: 수인 03-597 호

**** 본 제품은 일회용 멸균 의료기기입니다. 재사용을 금지합니다. ****

**** 사용 전 본 사용설명서를 읽어 주시기 바랍니다. ****

사용방법

가. 사용 전 준비사항

- (1) 사용 전에 바늘을 구부리면 제품의 파손 또는 환자의 부상을 유발할 수 있음.
- (2) 제품 및 포장의 파손 또는 오염이 있을 경우 사용을 금함.

나. 사용방법

- (1) 필요할 경우 장갑을 착용한다.
- (2) 침관에 닿지 않도록 조심스럽게 캡을 비틀어 똑바로 잡아당겨 빼낸다.
- (3) 캡을 빼낸 후 사용하고자 하는 주사기를 캡을 빼낸 자리에 끼운다.
- (4) 케이스를 똑바로 잡아당겨 제거한 후 원하는 시술부위에 사용한다.
- (5) 주사침을 뺀 후 필요할 경우 지혈을 한다.

다. 저장방법 및 유효기간

- (1) 저장방법: 고온이나 습기 및 직사광선을 피하여 보관한다.
- (2) 사용기한: 제조일로부터 5년

사용 시 주의사항

가. 본 제품은 카트리지 형태의 치과용 주사기(스크류 타입)에 사용하기에 적합하다.

나. 주사액 주입 전 약액을 몇 방울 배출시킨 후 사용한다.

본 제품과 주사기를 장착할 때 카트리지 단면부의 고무 조각에 침관이 막혀 주입이 이루어지지 않을 수 있음.

다. 포장을 뜯은 후 바로 사용하며, 1회 사용하고 버린다.

기타사항

허가번호: 수인 03-597 호

품 목 명: 치과용주사침 (A53010.11)

모 델 명: 제조원의 표시사항 참조(REF 참조)

수 입 원: 한국테루모(주)/서울특별시 서초구 서초대로 411, 23층 1호(서초동)/(02) 565-9225

제 조 원: 제조의뢰자: Terumo Corporation (일본)/44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

제조자: Terumo Corporation-Kofu Factory (일본)/

1727-1, Tsuijijarai showa-cho, Nakakoma-gun, Yamanashi Prefecture, Japan

포장단위: 100개/박스

저장방법: 고온이나 습기 및 직사광선을 피하여 보관한다.

사용목적: 본 제품은 치과마취 등을 위한 카트리지 시린지의 주입기로써 사용된다.