

CAPIOX ARTERIAL FILTER (AF02)

작성연월: 2021.02.03

품목명: 심폐용혈액여과기

품목허가번호: 수허 03-85 호

**** 본 제품은 일회용 멸균 의료기기입니다. 재사용을 금지합니다. ****

**** 사용 전 본 사용설명서를 읽어 주시기 바랍니다. ****

사용방법

- 1) 준비
 - ① 본체를 전용 홀더에 끼운다.
 - ② 본 품의 혈액 유입구 및 혈액유출구에 라인을 각각 접속하고, 에어 벤트의 캡을 벗긴다.
 - ③ 필요에 따라 세정액을 충전하고, 세정액을 순환시켜 세정한다. 세정 후, 세정액은 폐기한다.
- 2) 체외순환 개시
 - ① 본 품 내에 흡인하여, 여과, 기포 제거를 한다.
- 3) 체외순환 종료
 - ① 체외순환 종료 후 본 품 내에 잔혈을 체내에 보내든지, 폐기한다.

사용 시 주의사항

- 1) 본 제품은 일회용 사용을 위해 제조된 소모품이므로 재소독 또는 재사용을 해서는 안 된다.
- 2) 사용 전에 혈액저장조의 치수와 손상된 부위가 없는지를 확인한다.
- 3) 본 품은 E.O.Gas 멸균을 한 것으로서, 포장에 파손되었을 경우에는 사용해서는 안 된다.

기타사항

허가번호: 수허 03-85호

품 목 명: 심폐용혈액여과기 (A09070.01)

모 델 명: CX*AF02

수 입 원: 한국테루모(주)/서울특별시 서초구 서초대로 411, 23층 1호(서초동)/(02) 565-9225

제 조 원: 제조의뢰자: Terumo Corporation (일본)/44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo
제조사: Terumo Corporation- Ashitaka Factory (일본)/150, Maimaigi-cho, Fujinomiya city, Shizuoka Prefecture

포장단위: 1개/CASE

저장방법: 물, 직사광선, 고온, 높은 습도에 노출되지 않아야 한다.

사용목적: 혈액내의 이물질, 혈전 등을 여과