

# SURFLO WINGED INFUSION SET

---

작성연월: 2023.05.19

품목명: 비이식형혈관접속용기구

품목허가번호: 수인 23-4172 호

**\*\* 본 제품은 일회용 멸균 의료기기입니다. 재사용을 금지합니다. \*\***

**\*\* 사용 전 본 사용설명서를 읽어 주시기 바랍니다. \*\***

---

## 사용방법

---

### 가. 사용 전 준비사항

- 1) 포장을 개봉한다.
- 2) 주입세트, 주사기 등을 연결하고 고정한다.
- 3) 프라이밍을 진행하고 주입 용액이 바늘에서 나오는지 확인한다.

### 나. 사용방법 및 조작순서

- 1) Cwing을 움켜쥔다.
- 2) SV 보호마개를 제거한다.
- 3) 정맥 천자를 수행하고 혈관에서 적절한 위치를 확인한다.
- 4) 시설 프로토콜별 날개형 주입세트의 위치를 확보한다.

### 다. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) Cwing에 테이프가 있는 경우, 제거한다.
- 2) 천자 부위에서 바늘을 완전히 제거하고 멸균 거즈 패드를 사용하여 부위에 디지털 압력을 가합니다.
- 3) 사용한 바늘과 재료는 시설의 정책 및 절차와 '날카로운 폐기'에 대한 연방 및 지역 규정에 따라 폐기하십시오.
- 4) 일회용제품이므로 재사용하지 않는다.

## 사용 시 주의사항

---

### 가. 일반적 주의

- 1) 단위 포장이 손상된 경우 사용하지 마십시오.
- 2) 단위 포장을 개봉한 직후 사용하지 마십시오.
- 3) 일회용 제품입니다.
- 4) 감염의 위험을 피하기 위해 1회 사용 후 안전 폐기하십시오.
- 5) 극한의 온도와 습도에 보관하지 마십시오.
- 6) 안전한 사용 후 감염 위험을 피하기 위해 의료폐기물로 처리하여 지역 병원/의료 기관 정책에 따라 폐기하십시오.
- 7) 재사용은 감염 위험을 증가 시킵니다.

## SURFLO WINGED INFUSION SET

---

### 기타사항

---

허가번호: 수인 23-4172 호

품 목 명: 비이식형혈관접속용기구 (A57250.01)

제 품 명: Surflo Winged Infusion set

모 델 명: SV\*25NL30B

수 입 원: 한국테루모(주)/서울특별시 서초구 서초대로 411, 23층 1호(서초동)/(02) 565-9225

제 조 원: 제조자: Terumo Medical Products (Hangzhou) Co., Ltd. (중국)/M4-9-5 Hangzhou Economic & Technological Development Zone, 310018, Hangzhou, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

포장단위: 제조원 포장단위 (50ea/box)

저장방법: 극한 온도와 습도에서 보관하지 말 것. 실온보관

사용목적: 본 제품은 환자의 혈관에 접속하기 위해 사용하는 비이식형혈관접속용기구로 주사기나 다른 장치에 연결하여 정맥 주사에 사용된다.