

품목명: 혈관카테터안내선

품목허가번호: 수인 03-117 호

**** 본 제품은 일회용 멸균 의료기기입니다. 재사용을 금지합니다. ****

**** 사용 전 본 사용설명서를 읽어 주시기 바랍니다. ****

사용방법

가. 사용전 준비사항

- 사용하기 직전까지 포장을 뜯지 않도록 주의한다.
- 본품을 holder로부터 휘거나 꼬이지 않도록 꺼낸다.
- Angio-Needle, Guide Wire, Introducer 등 혈관 조영에 필요한 기구를 미리 준비해 둔다.

나. 사용방법 및 조작순서

- (1) 바늘(Angio-Needle)로 대퇴부 동맥(Femoral Artery)를 천자한다.
- (2) 천자된 혈관 안으로 Introducer를 삽입시킨다.
- (3) 위치가 확보된 Introducer 안으로 카테터 유도관(Guide Wire)을 삽입한다.
- (4) 혈관 안으로 길이 확보된 카테터 유도관(Guide Wire)을 따라서 가이딩 카테터를 1차 혈관까지 삽입한다.
- (5) 카테터 유도관을 빼낸다.
- (6) 가이딩 카테터가 마련해 놓은 길을 따라서 본품인 PTCA Guide Wire에 PTCA 카테터를 끼워서, PTCA Guide Wire를 진행시키며 조영하기를 원하는 2차, 3차 혈관까지 찾아나간다.
- (7) 원하는 혈관 위치까지 도달하면 PTCA Guide Wire를 PTCA 카테터에서 빼낸다.
- (8) 카테터를 통하여 조영제 및 약물을 주입하고, 원하는 작업이 끝났으면 카테터를 빼내고 혈관 조영을 마친다.

다. 사용후 보관 및 관리 방법

- 1회 사용 후 재소독 사용해서는 안되고 폐기시킨다.

사용 시 주의사항

가. 주의사항

- 1) 포장을 뜯은 후 바로 사용한다.
- 2) 1회 사용하고 버린다. (재소독하여 사용금지)
- 3) 모든 조작은 무균적으로 행한다.
- 4) 만일, 포장이 파손 또는 심하게 오염되었거나, 제품의 파손이 확인된 경우, 사용해서는 안된다.

기타사항

허가번호: 수인 03-117 호

품 목 명: 혈관카테터안내선 (A64160.01)

모 델 명: 제조원의 표시사항 참조(REF 참조)

수 입 원: 한국테루모(주)/서울특별시 서초구 서초대로 411, 23층 1호(서초동)/(02) 565-9225

제 조 원: 제조의뢰자: Terumo Corporation (일본)/44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

제조사: Terumo Corporation- Ashitaka Factory (일본)/

150, Maimaigi-cho, Fujinomiya city, Shizuoka Prefecture, Japan

저장방법: 물, 직사광선, 고온, 높은 습도에 노출되지 않아야 한다.

포장단위: 1개/case

사용목적: 경피카테터를 혈관속으로 유도