

RADIFOCUS GUIDE WIRE M (Reshapable)

작성연월: 2025.01.06

품목명: 혈관카테터안내선

품목허가번호: 수인 03-131 호

**** 본 제품은 일회용 멸균 의료기기입니다. 재사용을 금지합니다. ****

**** 사용 전 본 사용설명서를 읽어 주시기 바랍니다. ****

사용방법

- 1) 바늘(Angio Needle)로 대퇴부 동맥을 천자한다.
- 2) 천자된 바늘(Angio Needle) 속으로 카테터 유도관(Guide Wire)을 삽입한다.
- 3) 카테터 유도관이 혈관안으로 삽입되면 바늘(Needle)은 제거한다.
- 4) 카테터 유도관(Guide Wire)의 끝부분을 손으로 조작하여 혈관조영 부위까지 이동시킨다.
- 5) 카테터 유도관을 따라 카테터(Angio Catheter)를 삽입한다.
- 6) 카테터(Angio Catheter)가 조영하고자 하는 부위에 도달하면 카테터 유도관을 혈관에서 빼내고 카테터를 따라 조영제를 투여하여 사진을 찍는다.

사용 시 주의사항

- 1) 포장을 뜯은 후 바로 사용하며, 1회 사용하고 버린다.

기타사항

허가번호: 수인 03-131 호

품 목 명: 혈관카테터안내선 (A64160.01)

모 델 명: RE*GK35153M

수 입 원: 한국테루모(주)/서울특별시 서초구 서초대로 411, 23층 1호(서초동)/(02) 565-9225

제 조 원: 제조의뢰자: Terumo Corporation (일본)/44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo

제조자: Terumo Corporation, Ashitaka Factory (일본)/150, Maimaigi-cho, Fujinomiya city, Shizuoka Prefecture

포장단위: 1개/CASE

저장방법: 차광, 실온보관

사용목적: 혈관 조영 검사용 유도관

부작용 보고 관련 문의처: 한국의료기기안전정보원, 080-080-4183