

RADIFOCUS INTRODUCER

작성연월: 2025.01.06

품목명: 경피카테터

품목허가번호: 수인 03-134 호

**** 본 제품은 일회용 멸균 의료기기입니다. 재사용을 금지합니다. ****

**** 사용 전 본 사용설명서를 읽어 주시기 바랍니다. ****

사용방법

- 1) 바늘(Angio Needle)로 대퇴부 동맥을 천자
- 2) 바늘(Angio Needle) 안으로 미니 유도선(Mini-Guide Wire)을 삽입하여 혈액의 역류를 방지한다.
- 3) 바늘(Angio Needle)을 혈관으로부터 빼낸다.
- 4) 혈관안에 삽입되어 있는 미니 유도선(Mini-Guide Wire)을 따라, 혈관확장기(Dilator)와 혈관삽입 보조관(Sheeth)을 결합하여 혈관안에 삽입한다.
- 5) 혈관삽입 보조관(Sheeth)을 남겨두고 혈관확장기(Dilator)와 미니 유도선(Mini-Guide Wire)을 혈관에서 빼낸다.
- 6) 카테터 유도관(Guide Wire)의 끝부분을 손으로 조작하여 혈관조영부위까지 이동시킨다.
- 7) 카테터 유도관(Guide Wire)을 따라 카테터(Angio Catheter)를 삽입한다.
- 8) 카테터(Angio Catheter)가 조영하고자하는 부위에 도달하면, 카테터 유도관(Guide Wire)을 혈관에서 빼내고 카테터를 따라 조영제를 투여하여 사진을 촬영한다.
- 9) 촬영이 끝나면 카테터(Angio Catheter)와 혈관삽입 보조관(Sheeth)을 혈관에서 빼낸다.

사용 시 주의사항

포장을 뜯은 후 바로 사용하며 1 회 사용하고 버린다.

기타사항

허가번호: 수인 03-134 호

품 목 명: 경피카테터 (A57260.01)

모 델 명: 별첨 (총 37 건)

수 입 원: 한국테루모(주)/서울특별시 서초구 서초대로 411, 23 층 1 호(서초동)/(02) 565-9225

제 조 원: 제조의뢰자: Terumo Corporation (일본)/44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

제조사: Terumo Corporation- Ashitake Factory (일본)/

150, Maimaigi-cho, Fujinomiya-shi, Shizuoka Prefecture, Japan

포장단위: 1 개/CASE

저장방법: 물기에 주의하고, 직사광선 및 고온다습을 피해 보관할 것

사용목적: 가이드와이어 등을 사용하여 피부를 통하여 동맥 또는 정맥으로 삽입.

부작용 보고 관련 문의처: 한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

<별첨>

1	RS*A10K10S	9	RS*B11Q10MP	17	RS*B50Q10MR	24	RS*B80N10S	31	RS*B90Q10MP
2	RS*A11K10S	10	RS*B40G07S	18	RS*B60N10S	25	RS*B80N25A	32	RS*C40G10NP
3	RS*A60G07SQ	11	RS*B40G10MP	19	RS*B60N25A	26	RS*B80Q10MP	33	RS*C50N10NP
4	RS*B10N10S	12	RS*B40G10S	20	RS*B60Q10MP	27	RS*C10N10NP	34	RS*C60N10NP
5	RS*B10N25A	13	RS*B50G07S	21	RS*B70N10S	28	RS*B90N10S	35	RS*C70N10NP
6	RS*B10Q10MP	14	RS*B50N10S	22	RS*B70N25A	29	RS*B90N25A	36	RS*C80N10NP
7	RS*B11N10S	15	RS*B50N25A	23	RS*B70Q10MP	30	RS*C11N10NP	37	RS*C90N10NP
8	RS*B11N25A	16	RS*B50Q10MP						

