

RADIFOCUS INTRODUCER

작성연월: 2025.01.06

품목명: 경피카테터

품목허가번호: 수인 03-138 호

**** 본 제품은 일회용 멸균 의료기기입니다. 재사용을 금지합니다. ****

**** 사용 전 본 사용설명서를 읽어 주시기 바랍니다. ****

사용방법

- 1) 바늘(Angio Needle)로 대퇴부 동맥을 천자
- 2) 바늘(Angio Needle) 안으로 미니 유도선(Mini-Guide Wire)을 삽입하여 혈액의 역류를 방지한다.
- 3) 바늘(Angio Needle)을 혈관으로부터 빼낸다.
- 4) 혈관안에 삽입되어 있는 미니 유도선(Mini-Guide Wire)을 따라, 혈관확장기(Dilator)와 혈관삽입 보조관(Sheeth)을 결합하여 혈관안에 삽입한다.
- 5) 혈관삽입 보조관(Sheeth)을 남겨두고 혈관확장기(Dilator)와 미니 유도선(Mini-Guide Wire)을 혈관에서 빼낸다.
- 6) 카테터 유도관(Guide Wire)의 끝부분을 손으로 조작하여 혈관조영부위까지 이동시킨다.
- 7) 카테터 유도관(Guide Wire)을 따라 카테터(Angio Catheter)를 삽입한다.
- 8) 카테터(Angio Catheter)가 조영하고자하는 부위에 도달하면, 카테터 유도관(Guide Wire)을 혈관에서 빼내고 카테터를 따라 조영제를 투여하여 사진을 촬영한다.
- 9) 촬영이 끝나면 카테터(Angio Catheter)와 혈관삽입 보조관(Sheeth)을 혈관에서 빼낸다.

사용 시 주의사항

포장을 뜯은 후 바로 사용하며 1 회 사용하고 버린다.

기타사항

허가번호: 수인 03-138 호

품 목 명: 경피카테터 (A57260.01)

모 델 명: 별첨 (총 12 건)

수 입 원: 한국테루모(주)/서울특별시 서초구 서초대로 411, 23 층 1 호(서초동)/(02) 565-9225

제 조 원: 제조의뢰자: Terumo Corporation (일본)/44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

제조사: Terumo Corporation- Ashitake Factory (일본)/

150, Maimaigi-cho, Fujinomiya-shi, Shizuoka Prefecture, Japan

포장단위: 1 개/CASE

저장방법: 물기에 주의하고, 직사광선 및 고온다습을 피해 보관할 것

사용목적: 가이드와이어 등을 사용하여 피부를 통하여 동맥 또는 정맥으로 삽입.

부작용 보고 관련 문의처: 한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

<별첨>

1	RF*SA5011	4	RF*SA600102	7	RF*SA7011	9	RF*SA8011	11	RF*SA9011
2	RF*SA5012	5	RF*SA6011	8	RF*SA7013	10	RF*SA8013	12	RF*SA9013
3	RF*SA5013	6	RF*SA6013						