

품목명: 경피카테터

품목허가번호: 수인 03-1376 호

**** 본 제품은 일회용 멸균 의료기기입니다. 재사용을 금지합니다. ****

**** 사용 전 본 사용설명서를 읽어 주시기 바랍니다. ****

사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 사용하기 직전까지 포장을 뜯지 않도록 주의한다.
- 2) 카테터를 홀더로부터 휘거나 꼬이지 않도록 한다.
- 3) Angio-Needle, 가이드 와이어, Introducer 등 혈관 조영에 필요한 기구를 미리 준비해 둔다.

나. 사용방법 및 조작순서

- 1) 바늘(Angio-Needle)로 대퇴부 동맥을 천자한다.
- 2) 천자 된 혈관 안으로 Introducer를 삽입시킨다.
- 3) 위치가 확보된 Introducer 안으로 카테터 유도관(가이드 와이어)을 삽입한다.
- 4) 혈관 안으로 길이 확보된 카테터 유도관(가이드 와이어)를 따라서 본 품인 가이드 카테터를 삽입한다.
- 5) 본 품인 가이드 카테터가 원하는 위치에 자리를 잡으면, 가이드 카테터의 길에 따라 일반 진행시키며 조영하기를 원하는 좀 더 미세한 혈관까지 찾아 나간다.
- 6) 원하는 혈관 위치까지 도달하면 카테터 유도관을 카테터에서 빼낸다.
- 7) 카테터를 통하여 조영제 및 약물을 주입하고, 원하는 작업이 끝났으면 일반 카테터를 빼내고 필요에 따라 다른 타입의 일반 카테터를 주입한다.
- 8) 원하는 작업이 끝났으면 가이드 카테터를 빼내고 혈관 조영을 마친다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1회 사용 후 재소독 사용해서는 안되고 폐기시킨다.

사용 시 주의사항

- 1) 가이드 카테터의 팁부분을 reshape하지 말 것. Reshape은 카테터에 손상을 줄 위험이 있다.
- 2) 시술을 하는 동안 모니터로 혈관 안에서의 카테터의 위치를 확인하면서 조작하고, 특히 천천히 조심스럽게 시술해야 한다. 만약 끝부분에서 어떤 저항이 느껴지거나 카테터의 위치가 적절하지 않을 때에는 즉각 시술을 멈추어야 한다. 무리하게 진행시키면 혈관에 손상을 줄 수 있다.
- 3) 가이드 카테터 안에서 일반 카테터나 가이드 와이어가 휘거나 꼬였을 때는 급하게 진행시키지 않도록 주의한다. 무리하게 진행시키면 혈관에 손상을 줄 수 있다.
- 4) 이 가이드 카테터는 PTCA 시술 경험이 많은 의사에 의해 사용되어야 한다.
- 5) 1회 사용하고 버리고 재소독 및 재사용하지 말 것.
- 6) 포장이 뜯어졌거나 파손되었을 때에는 사용해서는 안된다.
- 7) 포장을 개봉하고 가능한 빨리 사용한다.
- 8) 모든 시술을 무균적으로 행한다.

HEARTRAIL

기타사항

허가번호: 수인 03-1376 호
 품 목 명: 경피카테터 (A57260.01)
 모 델 명: 별첨 (총 1065건)
 수 입 원: 한국테루모㈜/서울특별시 서초구 서초대로 411, 23층 1호, 2호(서초동)/(02) 565-9225
 제 조 원: 제조의뢰자: Terumo Corporation (일본)/44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan
 제조자: Terumo Corporation-Ashitaka factory (일본)/
 150 Maimaigi-cho, Fujinomiya city, Shizuoka Prefecture, Japan
 포장단위: 1개/BOX
 저장방법: 차광, 실온보관
 사용목적: 확장기, 쉬스, 가이드와이어 등을 사용하여 피부를 통하여 동맥, 또는 정맥으로 삽입되는 일반적 기구.
 부작용 보고 관련 문의처: 한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

<별첨>

1	GC-H5JL300N	38	GC-H6JL350AW	75	GC-H6JL450NB	112	GC-H7JL500A	149	GC-H7SL350NW
2	GC-H5JL300NW	39	GC-H6JL350AB	76	GC-H7JL450N	113	GC-H7JL500AW	150	GC-H7SL350NB
3	GC-H5JL300NB	40	GC-H7JL350A	77	GC-H7JL450NW	114	GC-H7JL500AB	151	GC-H8SL350N
4	GC-H6JL300N	41	GC-H7JL350AW	78	GC-H7JL450NB	115	GC-H8JL500A	152	GC-H8SL350NW
5	GC-H6JL300NW	42	GC-H7JL350AB	79	GC-H8JL450N	116	GC-H8JL500AW	153	GC-H8SL350NB
6	GC-H6JL300NB	43	GC-H8JL350A	80	GC-H8JL450NW	117	GC-H8JL500AB	154	GC-H5SL350A
7	GC-H7JL300N	44	GC-H8JL350AW	81	GC-H8JL450NB	118	GC-H5SL300N	155	GC-H5SL350AW
8	GC-H7JL300NW	45	GC-H8JL350AB	82	GC-H5JL450A	119	GC-H5SL300NW	156	GC-H5SL350AB
9	GC-H7JL300NG	46	GC-H5JL400N	83	GC-H5JL450AW	120	GC-H5SL300NB	157	GC-H6SL350A
10	GC-H8JL300N	47	GC-H5JL400NW	84	GC-H5JL450AB	121	GC-H6SL300N	158	GC-H6SL350AW
11	GC-H8JL300NW	48	GC-H5JL400NB	85	GC-H6JL450A	122	GC-H6SL300NW	159	GC-H6SL350AB
12	GC-H8JL300NB	49	GC-H6JL400N	86	GC-H6JL450AW	123	GC-H6SL300NB	160	GC-H7SL350A
13	GC-H5JL300A	50	GC-H6JL400NW	87	GC-H6JL450AB	124	GC-H8SL300N	161	GC-H7SL350AW
14	GC-H5JL300AW	51	GC-H6JL400NB	88	GC-H7JL450A	125	GC-H7SL300NW	162	GC-H7SL350AB
15	GC-H5JL300AB	52	GC-H7JL400N	89	GC-H7JL450AW	126	GC-H7SL300NB	163	GC-H8SL350A
16	GC-H6JL300A	53	GC-H7JL400NW	90	GC-H7JL450AB	127	GC-H8SL300N	164	GC-H8SL350AW
17	GC-H6JL300AW	54	GC-H7JL400NB	91	GC-H8JL450A	128	GC-H8SL300NW	165	GC-H8SL350AB
18	GC-H6JL300AB	55	GC-H8JL400N	92	GC-H8JL450AW	129	GC-H8SL300NB	166	GC-H5SL400N
19	GC-H7JL300A	56	GC-H8JL400NW	93	GC-H8JL450AB	130	GC-H5SL300A	167	GC-H5SL400NW
20	GC-H7JL300AW	57	GC-H8JL400NB	94	GC-H5JL500N	131	GC-H5SL300AW	168	GC-H5SL400NB
21	GC-H7JL300AB	58	GC-H5JL400A	95	GC-H5JL500NW	132	GC-H5SL300AB	169	GC-H6SL400N
22	GC-H8JL300A	59	GC-H5JL400AW	96	GC-H5JL500NB	133	GC-H6SL300A	170	GC-H6SL400NW
23	GC-H8JL300AW	60	GC-H5JL400AB	97	GC-H6JL500N	134	GC-H6SL300AW	171	GC-H6SL400NB
24	GC-H8JL300AB	61	GC-H6JL400A	98	GC-H6JL500NW	135	GC-H6SL300AB	172	GC-H7SL400N
25	GC-H5JL350N	62	GC-H6JL400AW	99	GC-H6JL500NB	136	GC-H7SL300A	173	GC-H7SL400NW
26	GC-H5JL350NW	63	GC-H6JL400AB	100	GC-H7JL500N	137	GC-H7SL300AW	174	GC-H7SL400NB
27	GC-H5JL350NB	64	GC-H7JL400A	101	GC-H7JL500NW	138	GC-H7SL300AB	175	GC-H8SL400N
28	GC-H6JL350N	65	GC-H7JL400AW	102	GC-H7JL500NB	139	GC-H8SL300A	176	GC-H8SL400NW
29	GC-H6JL350NW	66	GC-H7JL400AB	103	GC-H8JL500N	140	GC-H8SL300AW	177	GC-H8SL400NB
30	GC-H7JL350N	67	GC-H8JL400A	104	GC-H8JL500NW	141	GC-H8SL300AB	178	GC-H5SL400A
31	GC-H7JL350NW	68	GC-H8JL400AW	105	GC-H8JL500NB	142	GC-H5SL350N	179	GC-H5SL400AW
32	GC-H7JL350NB	69	GC-H8JL400AB	106	GC-H5JL500A	143	GC-H5SL350NW	180	GC-H5SL400AB
33	GC-H8JL350N	70	GC-H5JL450N	107	GC-H5JL500AW	144	GC-H5SL350NB	181	GC-H6SL400A
34	GC-H5JL350A	71	GC-H5JL450NW	108	GC-H5JL500AB	145	GC-H6SL350N	182	GC-H6SL400AW
35	GC-H5JL350AW	72	GC-H5JL450NB	109	GC-H6JL500A	146	GC-H6SL350NW	183	GC-H6SL400AB

HEARTRAIL

36	GC-H5JL350AB	73	GC-H6JL450N	110	GC-H6JL500AW	147	GC-H6SL350NB	184	GC-H7SL400A
37	GC-H6JL350A	74	GC-H6JL450NW	111	GC-H6JL500AB	148	GC-H7SL350N	185	GC-H7SL400AW
186	GC-H7SL400AB	236	GC-H8SL500AW	286	GC-H5JR400N	336	GC-H5JR500NB	386	GC-H6AL010NW
187	GC-H8SL400A	237	GC-H8SL500AB	287	GC-H5JR400NW	337	GC-H6JR500N	387	GC-H6AL010NB
188	GC-H8SL400AW	238	GC-H5JR300N	288	GC-H5JR400NB	338	GC-H6JR500NW	388	GC-H7AL010N
189	GC-H8JL400AB	239	GC-H5JR300NW	289	GC-H6JR400N	339	GC-H6JR500NB	389	GC-H7AL010NW
190	GC-H5SL450N	240	GC-H5JR300NB	290	GC-H6JR400NW	340	GC-H7JR500N	390	GC-H7AL010NB
191	GC-H5SL450NW	241	GC-H6JR300N	291	GC-H6JR400NB	341	GC-H7JR500NW	391	GC-H8AL010N
192	GC-H5SL450NB	242	GC-H6JR300NW	292	GC-H7JR400N	342	GC-H7JR500NB	392	GC-H8AL010NW
193	GC-H6SL450N	243	GC-H6JR300NB	293	GC-H7JR400NW	343	GC-H8JR500N	393	GC-H8AL010NB
194	GC-H6SL450NW	244	GC-H7JR300N	294	GC-H7JR400NB	344	GC-H8JR500NW	394	GC-H5AL010A
195	GC-H6SL450NB	245	GC-H7JR300NW	295	GC-H8JR400N	345	GC-H8JR500NB	395	GC-H5AL010AW
196	GC-H7SL450N	246	GC-H7JR300NB	296	GC-H8JR400NW	346	GC-H5JR500A	396	GC-H5AL010ABB
197	GC-H7SL450NW	247	GC-H8JR300N	297	GC-H8JR400NB	347	GC-H5JR500AW	397	GC-H6AL010A
198	GC-H7SL450NB	248	GC-H8JR300NW	298	GC-H5JR400A	348	GC-H5JR500AB	398	GC-H6AL010SW
199	GC-H8SL450N	249	GC-H8JR300NB	299	GC-H5JR400AW	349	GC-H6JR500A	399	GC-H6AL010AB
200	GC-H8SL450NW	250	GC-H5JR300A	300	GC-H5JR400AB	350	GC-H6JR500AW	400	GC-H7AL010A
201	GC-H8SL450NB	251	GC-H5JR300AW	301	GC-H6JR400A	351	GC-H6JR500AB	401	GC-H7AL010AW
202	GC-H5SL450A	252	GC-H5JR300AB	302	GC-H6JR400AW	352	GC-H7JR500A	402	GC-H7AL010AB
203	GC-H5SL450AW	253	GC-H6JR300A	303	GC-H6JR400AB	353	GC-H7JR500AW	403	GC-H8AL010A
204	GC-H5SL450AB	254	GC-H6JR300AW	304	GC-H7JR400A	354	GC-H7JR500AB	404	GC-H8AL010SW
205	GC-H6SL450A	255	GC-H6JR300AB	305	GC-H7JR400AW	355	GC-H8JR500A	405	GC-H8AL010AB
206	GC-H6SL450AW	256	GC-H7JR300A	306	GC-H7JR400AB	356	GC-H8JR500AW	406	GC-H5AL1SON
207	GC-H6SL450AB	257	GC-H7JR300AW	307	GC-H8JR400A	357	GC-H8JR500AB	407	GC-H5AL1SONW
208	GC-H7SL450A	258	GC-H7JR300AB	308	GC-H8JR400AW	358	GC-H5AL0G0N	408	GC-H5AL1SONB
209	GC-H7SL450AW	259	GC-H8JR300A	309	GC-H8JR400AB	359	GC-H5AL0G0NW	409	GC-H6AL1SON
210	GC-H7SL450AB	260	GC-H8JR300AW	310	GC-H5JR450N	360	GC-H5AL0G0NB	410	GC-H6AL1SONW
211	GC-H8SL450A	261	GC-H8JR300AB	311	GC-H5JR450NW	361	GC-H6AL0G0N	411	GC-H6AL1SONB
212	GC-H8SL450AW	262	GC-H5JR350N	312	GC-H5JR450NB	362	GC-H6AL0G0NW	412	GC-H7AL1SON
213	GC-H8SL450AB	263	GC-H5JR350NW	313	GC-H6JR450N	363	GC-H6AL0G0NB	413	GC-H7AL1SONW
214	GC-H5SL500N	264	GC-H5JR350NB	314	GC-H6JR450NW	364	GC-H7AL0G0N	414	GC-H7AL1SONB
215	GC-H5SL500NW	265	GC-H6JR350N	315	GC-H6JR450NB	365	GC-H7AL0G0NW	415	GC-H8AL1SON
216	GC-H5SL500NB	266	GC-H6JR350NW	316	GC-H7JR450N	366	GC-H7AL0G0NB	416	GC-H8AL1SONW
217	GC-H6SL500N	267	GC-H6JR350NB	317	GC-H7JR450NW	367	GC-H8AL0G0N	417	GC-H8AL1SONB
218	GC-H6SL500NW	268	GC-H7JR350N	318	GC-H7JR450NB	368	GC-H8AL0G0NW	418	GC-H5AL1SOA
219	GC-H6SL500NB	269	GC-H7JR350NW	319	GC-H8JR45N	369	GC-H8AL0G0NB	419	GC-H5AL1SOAW
220	GC-H7SL500N	270	GC-H7JR350NB	320	GC-H8JR450NW	370	GC-H5AL0G0A	420	GC-H5AL1SOAB
221	GC-H7SL500NW	271	GC-H8JR350N	321	GC-H8JR450NB	371	GC-H5AL0G0AW	421	GC-H6AL1SOA
222	GC-H7SL500NB	272	GC-H8JR350NW	322	GC-H5JR450A	372	GC-H5AL0G0AB	422	GC-H6AL1SOAW
223	GC-H8SL500N	273	GC-H8JR350NB	323	GC-H5JR450AW	373	GC-H6AL0G0A	423	GC-H6AL1SOAB
224	GC-H8SL500NW	274	GC-H5JR350A	324	GC-H5JR450AB	374	GC-H6AL0G0AW	424	GC-H7AL1SOA
225	GC-H8SL500NB	275	GC-H5JR350AW	325	GC-H6JR450A	375	GC-H6AL0G0AB	425	GC-H7AL1SOAW
226	GC-H5SL500A	276	GC-H5JR350AB	326	GC-H6JR450AW	376	GC-H7AL0G0A	426	GC-H7AL1SOAB
227	GC-H5SL500AW	277	GC-H6JR350A	327	GC-H6JR450AB	377	GC-H7AL0G0AW	427	GC-H8AL1SOA
228	GC-H5SL500AB	278	GC-H6JR350AW	328	GC-H7JR450A	378	GC-H7AL0G0AB	428	GC-H8AL1SOAW
229	GC-H6SL500A	279	GC-H6JR350AB	329	GC-H7JR450AW	379	GC-H8AL0G0A	429	GC-H8AL1SOAB
230	GC-H6SL500AW	280	GC-H6JR350A	330	GC-H7JR450AB	380	GC-H8AL0G0AW	430	GC-H5AL020N
231	GC-H6SL500AB	281	GC-H7JR350AW	331	GC-H8JR450A	381	GC-H8AL0G0AB	431	GC-H5AL020NW
232	GC-H7SL500A	282	GC-H7JR350AB	332	GC-H8JR450AW	382	GC-H5AL010N	432	GC-H5AL020NB
233	GC-H7SL500AW	283	GC-H8JR350A	333	GC-H8JR450AB	383	GC-H5AL010NW	433	GC-H6AL020N

HEARTRAIL

234	GC-H7SL500AB	284	GC-H8JR350AW	334	GC-H5JR500N	384	GC-H5AL010NB	434	GC-H6AL020NW
235	GC-H8SL500A	285	GC-H8JR350AB	335	GC-H5JR500NW	385	GC-H6AL010N	435	GC-H6AL020NB
436	GC-H7AL020N	486	GC-H7BL300NB	536	GC-H8BL400NW	586	GC-H5BL500A	636	GC-H5QL400AB
437	GC-H7AL020NW	487	GC-H8BL300N	537	GC-H8BL400NB	587	GC-H5BL500AW	637	GC-H6QL400A
438	GC-H7AL020NB	488	GC-H8BL300NW	538	GC-H5BL400A	588	GC-H5BL500AB	638	GC-H6QL400AW
439	GC-H8AL020N	489	GC-H8BL300NB	539	GC-H5BL400AW	589	GC-H6BL500A	639	GC-H6QL400AB
440	GC-H8AL020NW	490	GC-H5BL300A	540	GC-H5BL400AB	590	GC-H6BL500AW	640	GC-H7QL400A
441	GC-H8AL020NB	491	GC-H5BL300AW	541	GC-H6BL400A	591	GC-H6BL500AB	641	GC-H7QL400AW
442	GC-H5AL020A	492	GC-H5BL300AB	542	GC-H6BL400AW	592	GC-H7BL500A	642	GC-H7QL400AB
443	GC-H5AL020AW	493	GC-H6BL300A	543	GC-H6BL400AB	593	GC-H7BL500AW	643	GC-H8QL400A
444	GC-H5AL020AB	494	GC-H6BL300AW	544	GC-H7BL400A	594	GC-H7BL500AB	644	GC-H8QL400AW
445	GC-H6AL020A	495	GC-H6BL300AB	545	GC-H7BL400AW	595	GC-H8BL500A	645	GC-H8QL400AB
446	GC-H6AL020AW	496	GC-H7BL300A	546	GC-H7BL400AB	596	GC-H8BL500AW	646	GC-H5MP030N
447	GC-H6AL020AB	497	GC-H7BL300AW	547	GC-H8BL400A	597	GC-H8BL500AB	647	GC-H5MP030NW
448	GC-H7AL020A	498	GC-H7BL300AB	548	GC-H8BL400AW	598	GC-H5QL450N	648	GC-H5MP030NB
449	GC-H7AL020AW	499	GC-H8BL300A	549	GC-H8BL400AB	599	GC-H5QL350NW	649	GC-H6MP030N
450	GC-H7AL020AB	500	GC-H8BL300AW	550	GC-H5BL450N	600	GC-H5QL350NB	650	GC-H6MP030NW
451	GC-H8AL020A	501	GC-H8BL300AB	551	GC-H5BL450NW	601	GC-H6QL350N	651	GC-H6MP030NB
452	GC-H8AL020AW	502	GC-H5BL350N	552	GC-H5BL450NB	602	GC-H6QL350NW	652	GC-H7MP030N
453	GC-H8AL020AB	503	GC-H5BL350NW	553	GC-H6BL450N	603	GC-H6QL350NB	653	GC-H7MP030NW
454	GC-H5BL250N	504	GC-H5BL350NB	554	GC-H6BL450NW	604	GC-H7QL350N	654	GC-H7MP030NB
455	GC-H5BL250NW	505	GC-H6BL350N	555	GC-H6BL450NB	605	GC-H7QL350NW	655	GC-H8MP030N
456	GC-H5BL250NB	506	GC-H6BL350NW	556	GC-H7BL450N	606	GC-H7QL350NB	656	GC-H8MP030NW
457	GC-H6BL250N	507	GC-H6BL350NB	557	GC-H7BL450NW	607	GC-H8QL350N	657	GC-H8MP030NB
458	GC-H6BL250NW	508	GC-H7BL350N	558	GC-H7BL450NB	608	GC-H8QL350NW	658	GC-H5MP030A
459	GC-H6BL250NB	509	GC-H7BL350NW	559	GC-H8BL450N	609	GC-H8QL350NB	659	GC-H5MP030AW
460	GC-H7BL250N	510	GC-H7BL350NB	560	GC-H8BL450NW	610	GC-H5QL350A	660	GC-H5MP030AB
461	GC-H7BL250NW	511	GC-H8BL350N	561	GC-H8BL450NB	611	GC-H5QL350AW	661	GC-H6MP030A
462	GC-H7BL250NB	512	GC-H8BL350NW	562	GC-H5BL450A	612	GC-H5QL350AB	662	GC-H6MP030AW
463	GC-H8BL250N	513	GC-H8BL350NB	563	GC-H5BL450AW	613	GC-H6QL350A	663	GC-H6MP030AB
464	GC-H8BL250NW	514	GC-H5BL350A	564	GC-H5BL450AB	614	GC-H6QL350AW	664	GC-H7MP030A
465	GC-H8BL250NB	515	GC-H5BL350AW	565	GC-H6BL450A	615	GC-H6QL350AB	665	GC-H7MP030AW
466	GC-H5BL250A	516	GC-H5BL350AB	566	GC-H6BL450AW	616	GC-H7AL350A	666	GC-H7MP030AB
467	GC-H5BL250AW	517	GC-H6BL350A	567	GC-H6BL450AB	617	GC-H7QL350AW	667	GC-H8MP030A
468	GC-H5BL250AB	518	GC-H6BL350AW	568	GC-H7BL450A	618	GC-H7QL350AB	668	GC-H8MP030AW
469	GC-H6BL250A	519	GC-H6BL350AB	569	GC-H7BL450AW	619	GC-H8QL350A	669	GC-H8MP030AB
470	GC-H6BL250AW	520	GC-H7BL350A	570	GC-H7BL450AB	620	GC-H8QL350AW	670	GC-H5MP020N
471	GC-H6BL250AB	521	GC-H7BL350AW	571	GC-H8BL450A	621	GC-H8QL350AB	671	GC-H5MP020NW
472	GC-H7BL250A	522	GC-H7BL350AB	572	GC-H8BL450AW	622	GC-H5QL400N	672	GC-H5MP020NB
473	GC-H7BL250AW	523	GC-H8BL350A	573	GC-H8BL450AB	623	GC-H5QL400NW	673	GC-H6MP020N
474	GC-H7BL250AB	524	GC-H8BL350AW	574	GC-H5BL500N	624	GC-H5QL400NB	674	GC-H6MP020NW
475	GC-H8BL250A	525	GC-H8BL350AB	575	GC-H5BL500NW	625	GC-H6QL400N	675	GC-H6MP020NB
476	GC-H8BL250AW	526	GC-H5BL400N	576	GC-H5BL500NB	626	GC-H6QL400NW	676	GC-H7MP020N
477	GC-H8BL250AB	527	GC-H5BL400NW	577	GC-H6BL500N	627	GC-H6QL400NB	677	GC-H7MP020NW
478	GC-H5BL300N	528	GC-H5BL400NB	578	GC-H6BL500NW	628	GC-H7QL400N	678	GC-H7MP020NB
479	GC-H5BL300NW	529	GC-H6BL400N	579	GC-H6BL500NB	629	GC-H7QL400NW	679	GC-H8MP020N
480	GC-H5BL300NB	530	GC-H6BL400NW	580	GC-H7BL500N	630	GC-H7QL400NB	680	GC-H8MP020NW
481	GC-H6BL300N	531	GC-H6BL400NB	581	GC-H7BL500NW	631	GC-H8QL400N	681	GC-H8MP020NB
482	GC-H6BL300NW	532	GC-H7BL400N	582	GC-H7BL500NB	632	GC-H8QL400NW	682	GC-H5MP020A
483	GC-H6BL300NB	533	GC-H7BL400NW	583	GC-H8BL500N	633	GC-H8QL400NB	683	GC-H5MP020AW

HEARTRAIL

484	GC-H7BL300N	534	GC-H7BL400NB	584	GC-H8BL500NW	634	GC-H5QL400A	684	GC-H5MP020AB
485	GC-H7BL300NW	535	GC-H8BL400N	585	GC-H8BL500NB	635	GC-H5QL400AW	685	GC-H6MP020A
686	GC-H6MP020AW	736	GC-H7IR100A	786	GC-H7IR200AB	836	GC-H8IL350AW	886	GC-H5IL500N
687	GC-H6MP020AB	737	GC-H7IR100AW	787	GC-H8IR200A	837	GC-H8IL350AB	887	GC-H5IL500NW
688	GC-H7MP020A	738	GC-H7IR100AB	788	GC-H8IR200AW	838	GC-H5IL400N	888	GC-H5IL500NB
689	GC-H7MP020AW	739	GC-H8IR100A	789	GC-H8IR200AB	839	GC-H5IL400NW	889	GC-H6IL500N
690	GC-H7MP020AB	740	GC-H8IR100AW	790	GC-H5IR250N	840	GC-H5IL400NB	890	GC-H6IL500NW
691	GC-H8MP020A	741	GC-H8IR100AB	791	GC-H5IR250NW	841	GC-H6IL400N	891	GC-H6IL500NB
692	GC-H8MP020AW	742	GC-H5IR150N	792	GC-H5IR250NB	842	GC-H6IL400NW	892	GC-H7IL500N
693	GC-H8MP020AB	743	GC-H5IR150NW	793	GC-H6IR250N	843	GC-H6IL400NB	893	GC-H7IL500NW
694	GC-H5MP010N	744	GC-H5IR150NB	794	GC-H6IR250NW	844	GC-H7IL400N	894	GC-H7IL500NB
695	GC-H5MP010NW	745	GC-H6IR150N	795	GC-H6IR250NB	845	GC-H7IL400NW	895	GC-H8IL500N
696	GC-H5MP010NB	746	GC-H6IR150NW	796	GC-H7IR250N	846	GC-H7IL400NB	896	GC-H8IL500NW
697	GC-H6MP010N	747	GC-H6IR150NB	797	GC-H7IR250NW	847	GC-H8IL400N	897	GC-H8IL500NB
698	GC-H6MP010NW	748	GC-H7IR150N	798	GC-H7IR250NB	848	GC-H8IL400NW	898	GC-H5IL500A
699	GC-H6MP010NB	749	GC-H7IR150NW	799	GC-H8IR250N	849	GC-H8IL400NB	899	GC-H5IL500AW
700	GC-H7MP010N	750	GC-H7IR150NB	800	GC-H8IR250NW	850	GC-H5IL400A	900	GC-H5IL500AB
701	GC-H7MP010NW	751	GC-H8IR150N	801	GC-H8IR250NB	851	GC-H5IL400AW	901	GC-H6IL500A
702	GC-H7MP010NB	752	GC-H8IR150NW	802	GC-H5IR250A	852	GC-H5IL400AB	902	GC-H6IL500AW
703	GC-H8MP010N	753	GC-H8IR150NB	803	GC-H5IR250AW	853	GC-H6IL400A	903	GC-H6IL500AB
704	GC-H8MP010NW	754	GC-H5IR150A	804	GC-H5IR250AB	854	GC-H6IL400AW	904	GC-H7IL500A
705	GC-H8MP010NB	755	GC-H5IR150AW	805	GC-H6IR250A	855	GC-H6IL400AB	905	GC-H7IL500AW
706	GC-H5MP010A	756	GC-H5IR150AB	806	GC-H6IR250AW	856	GC-H7IL400A	906	GC-H7IL500AB
707	GC-H5MP010AW	757	GC-H6IR150A	807	GC-H6IR250AB	857	GC-H7IL400AW	907	GC-H8IL500A
708	GC-H5MP010AB	758	GC-H6IR150AW	808	GC-H7IR250A	858	GC-H7IL400AB	908	GC-H8IL500AW
709	GC-H6MP010A	759	GC-H6IR150AB	809	GC-H7IR250AW	859	GC-H8IL400A	909	GC-H8IL500AB
710	GC-H6MP010AW	760	GC-H7IR150A	810	GC-H7IR250AB	860	GC-H8IL400AW	910	GC-H5IMA10N
711	GC-H6MP010AB	761	GC-H7IR150AW	811	GC-H8IR250A	861	GC-H8IL400AB	911	GC-H5ILA10NW
712	GC-H7MP010A	762	GC-H7IR150AB	812	GC-H8IR250AW	862	GC-H5IL450N	912	GC-H5IMA10NB
713	GC-H7MP010SW	763	GC-H8IR150A	813	GC-H8IR250AB	863	GC-H5IL450NW	913	GC-H6IMA10N
714	GC-H7MP010AB	764	GC-H8IR150AW	814	GC-H5IL350N	864	GC-H5IL450NB	914	GC-H6IMA10NW
715	GC-H8MP010A	765	GC-H8IR150AB	815	GC-H5IL350NW	865	GC-H6IL450N	915	GC-H6IMA10NB
716	GC-H8MP010AW	766	GC-H5IR200N	816	GC-H5IL350NB	866	GC-H6IL450NW	916	GC-H7IMA10N
717	GC-H8MP010AB	767	GC-H5IR200NW	817	GC-H6IL350N	867	GC-H6IL450NB	917	GC-H7IMA10NW
718	GC-H5IR-100N	768	GC-H5IR200NB	818	GC-H6IL350NW	868	GC-H7IL450N	918	GC-H7IMA10NB
719	GC-H5IR100NW	769	GC-H6IR200N	819	GC-H6IL350NB	869	GC-H7IL450NW	919	GC-H8IMA10N
720	GC-H5IR100NB	770	GC-H6IR200NW	820	GC-H7IL350N	870	GC-H7IL450NB	920	GC-H8IMA10NW
721	GC-H6IR100N	771	GC-H6IR200NB	821	GC-H7IL350NW	871	GC-H8IL450N	921	GC-H8IMA10NB
722	GC-H6IR100NW	772	GC-H7IR200N	822	GC-H7IL350NB	872	GC-H8IL450NW	922	GC-H5IMA10A
723	GC-H6IR100NB	773	GC-H7IR200NW	823	GC-H8IL350N	873	GC-H8IL450NB	923	GC-H5IMA10AW
724	GC-H7IR100N	774	GC-H7IR200NB	824	GC-H8IL350NW	874	GC-H5IL450A	924	GC-H5IMA10AB
725	GC-H7IR100NW	775	GC-H8IR200N	825	GC-H8IL350NB	875	GC-H5IL450AW	925	GC-H6IMA10A
726	GC-H7IR100NB	776	GC-H8IR200NW	826	GC-H5IL350A	876	GC-H5IL450AB	926	GC-H6IMA10AW
727	GC-H8IR100N	777	GC-H8IR200NB	827	GC-H5IL350AW	877	GC-H6IL450A	927	GC-H6IMA10AB
728	GC-H8IR100NW	778	GC-H5IR200A	828	GC-H5IL350AB	878	GC-H6IL450AW	928	GC-H7IMA10A
729	GC-H8IR100NB	779	GC-H5IR200AW	829	GC-H6IL350A	879	GC-H6IL450AB	929	GC-H7IMA10AW
730	GC-H5IR100A	780	GC-H5IR200AB	830	GC-H6IL350AW	880	GC-H7IL450A	930	GC-H7IMA10AB
731	GC-H5IR100AW	781	GC-H6IR200A	831	GC-H6IL350AB	881	GC-H7IL450AW	931	GC-H8IMA10A
732	GC-H5IR100AB	782	GC-H6IR200AW	832	GC-H7IL350A	882	GC-H7IL450AB	932	GC-H8IMA10AW
733	GC-H6IR100A	783	GC-H6IR200AB	833	GC-H7IL350AW	883	GC-H8IL450A	933	GC-H8IMA10AB

HEARTRAIL

734	GC-H6IR100AW	784	GC-H7IR200A	834	GC-H7IL350AB	884	GC-H8IL450AW	934	GC-H5FL300N
735	GC-H6IR100AB	785	GC-H7IR200AW	835	GC-H8IL350A	885	GC-H8IL450AB	935	GC-H5FL300NW
936	GC-H5FL300NB	962	GC-H6FL350NW	988	GC-H7FL400N	1014	GC-H7FL450NB	1040	GC-H8FL500NW
937	GC-H6FL300N	963	GC-H6FL350NB	989	GC-H7FL400NW	1015	GC-H8FL450N	1041	GC-H8FL500NB
938	GC-H6FL300NW	964	GC-H7FL350N	990	GC-H7FL400NB	1016	GC-H8FL450NW	1042	GC-H5FL500A
939	GC-H6FL300NB	965	GC-H7FL350NW	991	GC-H8FL400N	1017	GC-H8FL450NB	1043	GC-H5FL500AW
940	GC-H7FL300N	966	GC-H7FL350NB	992	GC-H8FL400NW	1018	GC-H5FL450A	1044	GC-H5FL500AB
941	GC-H7FL300NW	967	GC-H8FL350N	993	GC-H8FL400NB	1019	GC-H5FL450AW	1045	GC-H6FL500A
942	GC-H7FL300NB	968	GC-H8FL350NW	994	GC-H5FL400A	1020	GC-H5FL450AB	1046	GC-H6FL500AW
943	GC-H8FL300N	969	GC-H8FL350NB	995	GC-H5FL400AW	1021	GC-H6FL450A	1047	GC-H6FL500AB
944	GC-H8FL300NW	970	GC-H5FL350A	996	GC-H5FL400AB	1022	GC-H6FL450AW	1048	GC-H7FL500A
945	GC-H8FL300NB	971	GC-H5FL350AW	997	GC-H6FL400A	1023	GC-H6FL450AB	1049	GC-H7FL500AW
946	GC-H5FL300A	972	GC-H5FL350AB	998	GC-H6FL400AW	1024	GC-H7FL450A	1050	GC-H7FL500AB
947	GC-H5FL300AW	973	GC-H6FL350A	999	GC-H6FL400AB	1025	GC-H7FL450AW	1051	GC-H8FL500A
948	GC-H5FL300AB	974	GC-H6FL350AW	1000	GC-H7FL400A	1026	GC-H7FL450AB	1052	GC-H8FL500AW
949	GC-H6FL300A	975	GC-H6FL350AB	1001	GC-H7FL400AW	1027	GC-H8FL450A	1053	GC-H8FL500AB
950	GC-H6FL300AW	976	GC-H7FL350A	1002	GC-H7FL400AB	1028	GC-H8FL450AW	1054	GC-H6JL450NB
951	GC-H6FL300AB	977	GC-H7FL350AW	1003	GC-H8FL400A	1029	GC-H8FL450AB	1055	GC-H8JL350NW
952	GC-H7FL300A	978	GC-H7FL350AB	1004	GC-H8FL400AW	1030	GC-H5FL500N	1056	GC-H8JL350NB
953	GC-H7FL300AW	979	GC-H8FL350A	1005	GC-H8FL400AB	1031	GC-H5FL500NW	1057	GC-H5ST012NQ
954	GC-H7FL300AB	980	GC-H8FL350AW	1006	GC-H5FL450N	1032	GC-H5FL500NB	1058	GC-H5TR350N
955	GC-H8FL300A	981	GC-H8FL350AB	1007	GC-H5FL450NW	1033	GC-H6FL500N	1059	GC-H5TR350A
956	GC-H8FL300AW	982	GC-H5FL400N	1008	GC-H5FL450NB	1034	GC-H6FL500NW	1060	GC-H5TR400N
957	GC-H8FL300AB	983	GC-H5FL400NW	1009	GC-H6FL450N	1035	GC-H6FL500NB	1061	GC-H5TR400A
958	GC-H5FL350N	984	GC-H5FL400NB	1010	GC-H6FL450NW	1036	GC-H7FL500N	1062	GC-H6TR350N
959	GC-H5FL350NW	985	GC-H6FL400N	1011	GC-H6FL450NB	1037	GC-H7FL500NW	1063	GC-H6TR350A
960	GC-H5FL350NB	986	GC-H6FL400NW	1012	GC-H7FL450N	1038	GC-H7FL500NB	1064	GC-H6TR400N
961	GC-H6FL350N	987	GC-H6FL400NB	1013	GC-H7FL450NW	1039	GC-H8FL500N	1065	GC-H6TR400A